


## AD-patjat

### Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen

Painetta tasaavat antidecubitus AD-patjat reagoivat kehon lämpöön ja painoon. Patjat myötäilevät kehoa yksilöllisesti. Ihonalaiseen kudokseen kohdistuva paine pienenee ja paino jakaantuu tasaisesti.

Patjat soveltuvat käyttäjille, joilla on matala- tai keskiriski saada painehaavoja tai joilla on kehoon kohdistuvia kipuja.

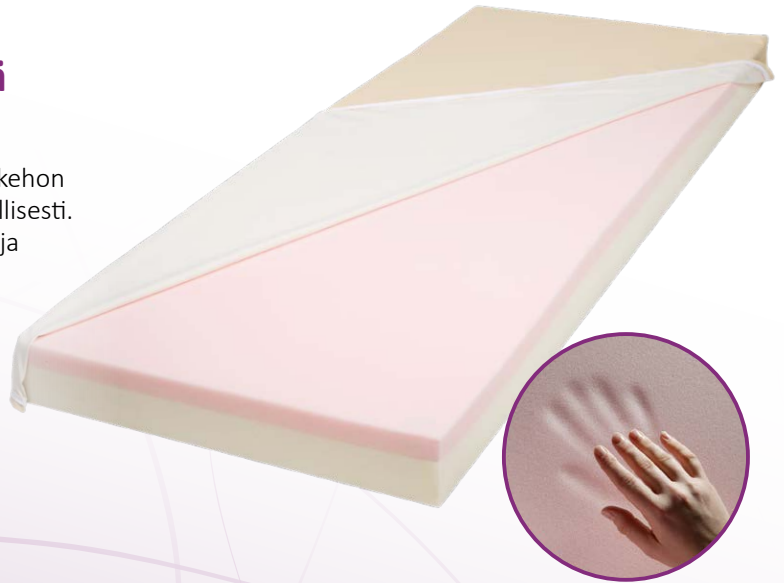

### AD-patja

AD-patjassa on pehmeä kolmikerrosrakenne. Patjan kaksi ylintä kerrosta ovat kehon lämpöön ja painoon reagoivaa viskoelastista vaahtomuovia. Ylin punertava kerros on pehmeämpi. Keskimmäinen kerros jakaa painoa tasaisesti. Pohjakerros on korkeakimmoista vaahtomuovia, minkä ansiosta patja on tukeva ja käyttäjän on helpompi vaihtaa asentoa. Jämäkkyys tukee istumista patjan reunalla.



**Rakenne:**

3+3 cm viskoelastinen vaahtomuovi  
6 cm tukevaa vaahtomuovia

### AD-standardipatja

AD-standardipatja on suosituin keskiriskipatjamme hyvän hinta-laatusuhteen ansiosta. Patjassa on kaksiosainen rakenne: alaosa on tukevaa korkeakimmoista vaahtomuovia ja yläosa nopeasti kehon lämpöön reagoivaa viskoelastista vaahtomuovia.



**Rakenne:**

4 cm viskoelastinen vaahtomuovi  
8 cm tukevaa vaahtomuovia

## AD-MAX -patja

AD-MAX -patja on jäykin AD-sarjan patja. Se on suunniteltu raskaammille käyttäjille, etteivät he painaudu liian syväälle. MAX-patjan alaosa on tukevaa korkeakimmoista vaahtomuovia, minkä ansiosta käyttäjän on helpompi vaihtaa asentoa. Jämäkkyys helpottaa istumista patjan reunalla. MAX-patjan viskoelastinen yläosa reagoi käyttäjän painoon ja muotoutuu kehon mukaan.

AD-MAX -patjan Silvosan-hygieniapäällinen on väriltään viininpunainen, minkä ansiosta sen erottaa muista patjoista.

Patjaa suositellaan 100 – 200 kg:n painoisille käyttäjille.

## Standardikoot:

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
80	200	12
90	200	12

Valmistamme myös muita kokoja.

## Paloturvallisuus:

SFS-EN 1021:2006, SL 1

## Silvosan-hygieniapäällinen

- Antibakteerinen
- Hengittävä ja joustava
- Kosteutta läpäisemätön ja hiostamaton
- pelastuslakana, jossa molemmissa päässä pitkät vetokahvat sekä sivuilla kahdet tarralliset kiinnityshihnat
- Vetoketju kahdella sivulla
- Neljään suuntaan joustava kangas mukaillee muotoutuvaa patjaa
- Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita ja viruksia vastaa (mm. E. Coli, Clostridium Difficile, MRSA, ESBL, VRE)
- Materiaali säilyttää antibakteerisen ominaisuutensa usean pesun jälkeenkin
- Luontoystävällinen ja myrkytön

## Kysy myös muita päällisvaihtoehtoja

### Rakenne:

6 cm viskoelastinen vaahtomuovi

6 cm tukevaa vaahtomuovia

## Hoito- ja käyttöohje

- Päällisen pintapyyhintä yleispuhdistusaineella ja aika ajoon puhtaalla vedellä.
- Tarvittaessa voidaan pyyhkiä klooriliuoksella (500 – 2000 ppm) tai alkoholijohdannaisilla pesuaineilla.
- Pesukonepesu max. 95 °C ja riippukuivatus.
- Patjan sisustaa ei suositella pestäväksi.
- Patja tulee kääntää kuukausittain ympäri pituussuunnassa.
- Patja tulee nostaa ajoittain kyljelleen vetoketju ylöspäin ja avata vetoketju tuulettumista varten.
- Runsaasti kastelevan tai erittävän käyttäjän alla tulee käyttää vuodesuojaa ja patja tulee tuulettaa useammin kuivumista varten.
- Huolehdi, että ilma pääsee kiertämään patjan pohjan kautta. Sängyssä on suositeltava olla esim. säle- tai verkkopohja.
- Neste, kosteus ja eritetahrat tulee poistaa välittömästi.

Pelastuslakanan vetokahvat pussin sisällä.

Pelastuslakanan vetokahvat auki toimintavalmiina.

Valmistaja: Suomen Terveysmaailma Oy



Tuote on merkitty laiterekisteriin.