


EX-hygieniapatja

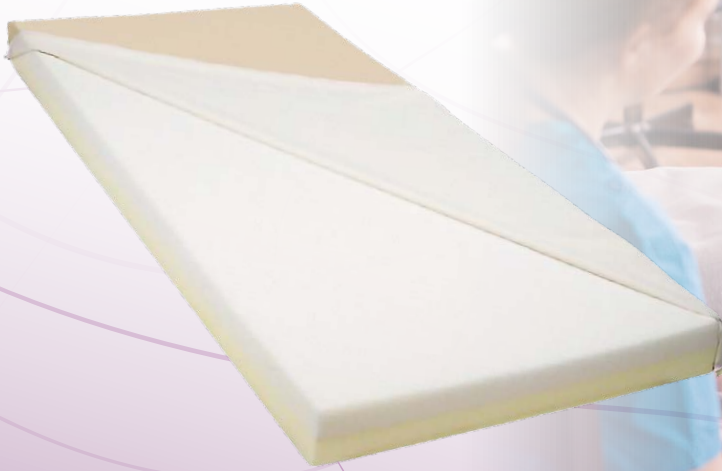

Profiloitu EX-hygieniapatja

Patjalla on pintapehennys-ominaisuus. Patjan alaosa on tukevaa korkeakimmoista vaahtomuovia. Pehmeämpi yläosa tukee ja myötäilee pehmeästi vartaloa. Patja kuuluu matalan riskin patjoihin.


Patja täyttää EU:n vaatimat tiukat turvallisuus-, terveys- ja ympäristökriteerit.

Neljään suuntaan joustava Silvosan-hygieniapäällinen tukee patjan ominaisuuksia. Päällisen voi valita pelastuslakanalla tai ilman.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.

Erityisominaisuudet

- Käytössä erittäin kestävä ja pitkäikäinen
- Myötäilee vartaloa ja lievittää kipua

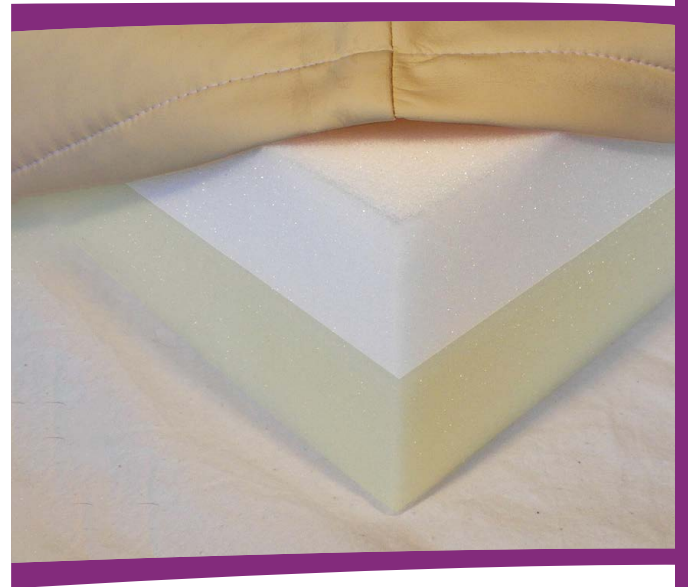

Rakenne:

6 cm pintapehmeää vaahtomuovia
6 cm tukevaa vaahtomuovia



Silvosan-hygieniapäällinen

- Antibakteerinen
- Hengittävä ja joustava
- Kosteutta läpäisemätön ja hiostamaton
- pelastuslakana, jossa molemmissa päässä pitkät vetokahvat sekä sivuilla kahdet tarralliset kiinnityshihnat
- Vetoketju kahdella sivulla
- Neljään suuntaan joustava kangas mukailee muotoutuvaa patjaa
- Silvosan perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita ja viruksia vastaa (mm. E. Coli, Clostridium Difficile, MRSA, ESBL, VRE)
- Materiaali säilyttää antibakteerisen ominaisuutensa usean pesun jälkeenkin
- Luontoystävällinen ja myrkytön

Kysy myös muita päällisvaihtoehtoja

Hoito- ja käyttöohje

- Päällisen pintapyyhintä yleispuhdistusaineella ja aika ajoin puhtaalla vedellä.
- Tarvittaessa voidaan pyyhkiä klooriliuoksella (500 – 2000 ppm) tai alkoholijohdannaisilla pesuaineilla.
- Pesukonepesu max. 95 °C ja riippukuivatus.
- Patjan sisustaa ei suositella pestäväksi.
- Patja tulee kääntää kuukausittain ympäri pituussuunnassa.
- Patja tulee nostaa ajoittain kyljelleen vetoketju ylöspäin ja avata vetoketju tuulettumista varten.
- Runsaasti kastelevan tai erittävän käyttäjän alla tulee käyttää vuodesuojaa ja patja tulee tuulettaa useammin kuivumista varten.
- Huolehdi, että ilma pääsee kiertämään patjan pohjan kautta. Sängyssä on suositeltava olla esim. säle- tai verkkopohja.
- Neste, kosteus ja eritetahrat tulee poistaa välittömästi.

Valmistaja: Suomen Terveysmaailma Oy

Standardikoot:

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
80	200	12
90	200	12

Valmistamme myös muita kokoja.

Paloturvallisuus:

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Pelastuslakanan vetokahvat pussin sisällä.



Pelastuslakanan vetokahvat auki toimintavalmiina.

