

Patjojen hoito- ja käyttöohje

Yleiset hoito-ohjeet

Antidecubituspatjat ovat pitkäikäisiä tuotteita. Patjojen asianmukaisella hoidolla varmistetaan niiden pitkä käyttöikä. Seuraaviin kolmeen toimenpiteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota patjojen huollossa:

1. Käänä patja säännöllisin väliajoin ympäri pituussuunnassa

Patjaan kohdistuu suurin rasitus hartijoiden kohdalle. Patja on suunniteltu kestäämään painoa, mutta patjan ominaisuudet (lämpöön ja painoon reagoiminen) säilyvät parhaiten, kun patja pääsee säännöllisesti palautumaan.

2. Huolehdi sängyn pohjan ja patjan välisestä ilmanvaihdosta

Kun sängyn pohjan ja patjan välinen ilmanvaihto toimii, patja ei pääse kostumaan. Sängyt, joissa on nk. ritiläpohja, tuulettuvat hyvin ja pitävän patjan alaosan kuivana. Mikäli sängyssä on nk. umpipohja, tulee patjan ilmanvaihtoon kiinnittää erityistä huomiota.

Jos näyttää siltä, että patja pääsee kostumaan alapinnaltaan, tulee huolehtia sen tuulettumisesta säännöllisesti nostamalla patja esim. pystyyn sänkyä vasten. Päällisen vetoketjun avaaminen nopeuttaa tuulettumista. Huomioi lisäksi, että sängyn on oltava kuiva, kun patja asetetaan sängylle.

3. Käytä tarvittaessa vuodesuojaa

Runsaasti kastelevan tai hikeä erittävän potilaan vuode tulee suojata vuodesuojalla.

Silvosan-hygieniapäällisen pesu ja desinfektio

Desinfektiossa suositellaan käytettäväksi seuraavia, Suomessa eniten käytettyjä desinfektioaineita:

- Klorilli 300–5000 ppm (kloramiini-T)
- Erisan Oxy+ 2 % (vetyperoksidi ja peretikkahappo)
- Easydes 100 % (etanoli, kvanternäärinen ammoniumyhdiste, alkyyliamiini)
- Erisan Des 2 % (kvanternäärinen ammoniumyhdiste, alkyyliamiini, fenoksietanoli)
- Päällisen kestävyys on testattu mm. Oxivirilla.

Neste, kosteus ja eritetahrat tulee puhdistaa viipymättä.

Peruspuhdistus

Pintapyyhintä yleispuhdistusaineella ja lisäksi aika ajoin pyyhintä puhtaalla vedellä, jolloin pesuainejäämät saadaan pois tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

Eritepuhdistus

1-vaiheinen eritetahrapuhdistus

- Pintapyyhintä 500–2000 ppm kloriitilla esim. Klorin (valkaiseva aine), jonka jälkeen puhdistus yleispuhdistusaineella
- Paikallisesti voidaan pyyhkiä 5000 ppm kloriitilla, jonka jälkeen pyyhintä yleispuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

2-vaiheinen eritetahrapuhdistus

- Eritteen imeytys paperiin tai kertakäyttöliinaan, jonka jälkeen pintapyyhintä 500–1000 ppm kloriittiliuoksella, jonka jälkeen pyyhintä yleispuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

Erityispuhdistus


Suosittelaaan päällisen koneellista pesua max. 95 asteessa ja riippukuivatusta. Jos päällinen pyyhitään ennen pesua, tulee pyyhintä toteuttaa eritetahradesinfiointina.

Patjan käyttö oikein päin

Alla olevista kuvista näet, miten päin patjaa käytetään.



Harmonia ECO

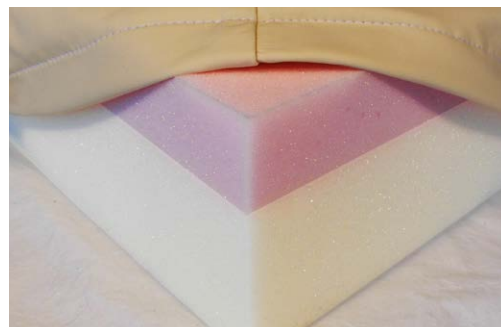

AD-standardipatja