

DIK- ja DIX-istuintyyny

Hygieenisuus, tukevuus ja antidecubitus-ominaisuudet

Keskiriskin istuintyyny jakaa istujan painon mahdollisimman suurelle alueelle ja ehkäisee pistekohtaista painetta, mikä parantaa verenkiertoa. Istuintyyny muotoutuu kehon lämmön ja painon mukaan.

Eritteitä läpäisemätön, joustava hygieniapäällinen on irrotettavissa pesua varten.

DIX-tyynyn kovikepohja tukee ryhtiä kokoontaittuvan pyörätuolin kangas-istuimella. Liukumattoman pintakankaan ansiosta istuintyyny pysyy hyvin paikallaan eikä käyttäjä liu'u eteenpäin.



DIK-istuintyyny:

- 6 cm korkea viskoelastinen vaahtomuovi

DIX-istuintyyny:

- Tukeva, pehmentävä ja hoitava istuintyyny
- 2 cm puristevaahtoa + 4 cm viskoelastista vaahtomuovia
- Sopii erityisen hyvin pyörätuoleihin, joissa on ns. rätti-istuin

Erityisominaisuudet:

- Viskoelastinen vaahtomuovi antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pinnan ansiosta tyyny pysyy hyvin paikoillaan
- Estää tyynyä käyttävää henkilöä liukumasta eteenpäin
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Helpottaa istuinalueen verenkiertoa
- Sopii koti- ja laituskäyttöön

Standardikoot:

Leveys cm	Pituus cm	Paksuus cm
40	40	6
42	45	6
40	45	6
45	50	6

Valmistamme myös muita kokoja.

Paloturvallisuus:

SFS-EN 1021:2006, SL 1

Valmistaja: Suomen Terveysmaailma Oy



DIX-istuintyynyn kovikepohja asetetaan pyörätuolin istuinputkien päälle. Istuma-alustasta tulee tukevampi ja vakaampi.

Sion-hygieniapäällinen:

Valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuoja. Päällinen on helppo pyyhkiä ja pestä pesukoneessa.

Hoito-ohjeet:

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Päällinen kestää hyvin konepesua (max. 75 °C)
- Ei linkousta, riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio
 - Klooriliuos 500 – 2000 ppm (max. 5000 ppm)
 - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
 - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2 %)
 - Lämpödesinfektio max. 85 °C
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi

