

CozinyPlus

Lasten ilmapatja

Lasten oma painehaava- ja kipupatja. Patjojen kennot on muotoiltu pienen ihmisen ihon herkkyys huomioonottaen: lasta vasten ei ole teräviä reunoja tai saumoja.

CozinyPlus-patjoissa on ainutlaatuinen IPS-teknikka, joka reagoi välittömästi liikkeisiin ja asennon vaihdoksiin tasaamalla paineen ilmakennoissa.

Pumppu toimii kuljetustilanteissa akulla.



Kaksi toimintoa:

- Vaihtuvapaineisessa toiminnossa paine vaihtuu täyttäen ja tyhjentäen joka toisen ilmakennon. Vaihtuvapaineisuuden voi säätää muuttuvaksi 10, 15 tai 20 minuutin välein.
- Staattisessa minimipainetoiminnossa paine pysyy tasaisena käyttäjän alla mukautuen käyttäjän painoon ja muotoihin.

Yksi pumppu:

Pumppuyksikkö on hiljainen ja helppo käyttää. Sama hauskaasti junakuviointu pumppuyksikkö sopii kaikkiin CozinyPlus-patjamalleihin. Pumppuyksiköstä valitaan:

- Käyttäjän paino
- Toiminto: staattinen vai dynaaminen
- Dynaamisen vaihdon aikaväli: 5, 10 tai 15 minuuttia

Pumppuyksikössä on:

- Lapsilukko
- Hälytys (sekä visuaalinen että kuuluva), jos patjayksikkö vioittuu tai ilmanpaine alenee
- Hälytysäänen hiljennys

Päällinen:

Patjan päällinen on hengittävä ja kosteutta kestävä. Se suojaa patjaa likaantumiselta. Päällinen joustaa neljään suuntaan. Materiaali on nailonia, joka on laminoitu PU-kalvolla. Päällisen voi pyyhkiä kostealla ja pestä pesukoneessa (70 °C).

Akku:

Pumppuyksikön akku varaa sähköä. Patja toimii keskeytyksettä siirtymätilanteissa tai sähkökatkosten aikana jopa 8 h.

Kolme patjakokoa:

Coziny 300 pinnasänkyyn

Mitat 140 x 70 x 8 cm, käyttäjän maksimipaino 25 kg. 39 ilmakennoa.

Turvapatja 2,8 cm.

Ilmaletkun voi tuoda ulos päällisestä kolmesta eri kohdasta.

Coziny 200 vastasyntyneen sänkyyn

Mitat 75 x 50 x 7 cm, käyttäjän maksimipaino 10 kg. 20 ilmakennoa.

Turvapatja 1,5 cm.

Ilmaletkun voi tuoda ulos päällisestä kolmesta eri kohdasta.

Coziny 100 keskoskaappiin

Mitat 65 x 35 x 3 cm, käyttäjän maksimipaino 3,5 kg. 40 ilmakennoa.

Ilmakennot on tehty erityisen pehmeästä TPU-materiaalista herkkää ihoa ajatellen. Materiaali lävistää keskoskaapin lämmön, jolloin patja pienen käyttäjän alla pysyy oikean lämpöisenä.

Valmistaja: Carilex Medical GmbH

